

En snabb checklista för mottagningen

Är patienten intresserad av Eversense E3 CGM-systemet?

- Granska Eversense E3 CGM-systemet med patienten (utöver allt annat du gör under ett normalt besök).
 - Ge patienten en patientbroschyr
 - Gå igenom kompatibla enheter
 - Gå igenom kontraindikationer
 - Gå igenom kontrollmätning av blodsocker
- Gå igenom viktiga fördelar med Eversense E3 CGM-systemet
 - > Långtidssensor
 - > Avtagbar smartsändare som varnar genom att vibrera
 - > Noggrannhet

När dagen Eversense E3 CGM-systemet har levererats till mottagningen

- Förvara sensorförpackningen i kylskåpet när den har kommit till mottagningen
- Säkerställ att nya insättningskit finns på mottagningen
- Boka tid för insättning med patienten
- Gå igenom instruktionen Förbered dig inför ditt CGM-besök
 - Be patienten att ladda ner appen och skapa ett konto
- Säkerställ att det material som krävs är tillgängligt på dagen när insättningen ska göras
 - Kontrollera sista förbrukningsdag för allt material
 - Säkerställ att det finns ett behandlingsrum och personal tillgängligt på dagen när insättningen ska göras
 - Procedurkit eller motsvarande
 - Sterila handskar
 - Lidokain 1% eller 2% (med eller utan adrenalin)
 - Klorhexidin- eller betadinlösning eller 3 st desinficerande tvättsuddar
- Komma igång med utbildningen
 - Du hittar utbildningsmaterial på **diabetes.ascensia.se**
 - Ladda ned utbildningsmaterial från Ascensia Diabetes Cares hemsida (diabetes.ascensia.se)
 - Be Ascensia Diabetes Cares kundsupport om utbildningsmaterial 020 - 83 00 84 (08:00-16.30)

Dagen för insättning av Eversense E3 CGM-systemet!

- Säkerställ att smartsändaren är laddad
- Bekräfta att patienten har laddat ner appen till sin mobila enhet
- Parkoppla smartsändaren och den mobila enheten
- Länka sensorn till smartsändaren/den mobila enheten
- Ge patienten dubbelhäftande plåster, asken med smartsändaren och material
- Se till att patienten vet hur Eversense E3 fungerar och vad som händer efter insättningen
- Informera patienten om hur de synkar sin data med mottagningen

Eversense E3 CGM-systemet är aktivt

- Lägg upp en uppföljningsplan/återbesök
- Boka in besök för återinsättning ca 180 dagar
- Kom ihåg att beställa Eversense E3 CGM-sensorn igen 1 månad innan patientens besök
- Du hittar digitalt utbildningsmaterial på **diabetes.ascensia.se**





- ➔ Eversense E3 –sensorkit (90008166)
- Förpackningen måste placeras i kylskåp direkt
 - Kontrollera sista förbrukningsdatum
 - 1 paket per patient
 - En reservsensor rekommenderas för mottagningen



- ➔ Insättningskit (90008151)
- Innehåller snittmall, insättningsinstrument och bruksanvisning
 - Kontrollera sista förbrukningsdatum
 - 1 paket skickas automatiskt med varje beställd sensor
 - Ett reservpaket med verktyg rekommenderas för mottagningen



- ➔ E3 Smartsändarkit (90008148)
- Innehåller: laddningsdocka, väggadapter och bruksanvisningar
 - Ladda smartsändaren samma dag som insättningen görs
 - 1 paket per ny patient med ett års garanti



- ➔ Plåsterkit (90008165)
- 150 vita och 30 transparenta dubbelhäftande plåster (totalt 180 dubbelhäftande plåster)
 - Kontrollera sista förbrukningsdatum
 - Kan beställas separat:
 - 30 vita dubbelhäftande plåster (90007704)
 - 30 genomskinliga dubbelhäftande plåster (90007705)



- ➔ Procedurkit (90007877) eller motsvarande
- Innehåller icke-sterila och sterila artiklar
 - Innehåller INTE sterila handskar, lidokain, klorhexidin/betadin