

EVERSENSE E3 NÄSTA STEG

Kontakter:

- Kontakta vårdgivaren som utförde proceduren för frågor om insättningsstället.
- Kontakta din diabetessköterska/läkare om du har frågor om din diabeteshantering.
- Kontakta Eversense kundsupport om du har tekniska frågor, eller behöver hjälp med att komma igång med Eversense: tel: 020 - 83 00 84, e-post: Eversense.se@ascensia.com.

Så tar du hand om insättningsstället för korrekt läkning

- **Undvik att bada eller blöta ned snittområdet i ett badkar i minst 5 dagar. Att duscha går bra, men undvik en direkt vattenström mot området.**
- Tegaderm™ ska sitta på i minst fem dagar. Om det lossnar innan dess ska du sätta dit ett nytt. Var extra försiktig så att du inte drar loss dina Steri-Strips™ när du tar bort Tegaderm™-plåstret.
- Skydda insättningsstället från fukt och svett. Undvik också fysisk ansträngning som belastar såret så det riskerar att gå upp. Tjänjning på såret försämrar också sårhäkning.
- Låt Steri-Strips™ sitta kvar tills de ramlar av.



Informera din läkare om:

- Steri-Strips™ lossnar innan snittet har läkt helt.
- Du får feber eller upplever smärta, rodnad, svullnad, värme eller läckande vätskor vid snittområdet.

Läs noga avsnittet **Fördelar och risker** i **bruksanvisningen till ditt Eversense E3 CGM-system**.

Titta på instruktionsfilmerna på <https://www.diabetes.ascensia.se/eversense-e3/support/eversense-e3/onboarding-videos/>

1 Dag Ett: Kom igång

- Läs bifogade *bruksanvisning till Eversense E3* och *snabbguiden*.
- Ladda ned Eversense-appen och parkoppla din sändare med din mobila enhet.
- Koppla ihop sensorn och smartsändaren och starta uppvärmningsfasen på 24 timmar.
- Ange de inställningar som diskuterats med och tillhandahållits av ditt diabetesvårdsteam.
- Stäng av sändaren, du behöver inte ha den på dig förrän du startar initieringsfasen.

2 Dag Två: Systemets initieringsfas börjar

- Placera sändaren på det självhäftande plåstret och placera det över sensorn, där signalen är som starkast.
- Genomför 4 initieringskalibreringar. Kalibreringarna kan genomföras så ofta som varannan timme, men du måste genomföra alla fyra inom 36 timmar.
- Efter den andra godkända kalibreringen kommer du börja se dina glukosdata.

3 Dag Tre och därefter: Daglig användning

- Fasen med dagliga kalibreringar börjar.
- Efter dag 21: primärt en kalibrering per dag.

Systemet Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer i upp till 180 dagar hos personer med diabetes som är 18 år och äldre. Systemet är avsett att ersätta mätning av blodsöcker (BG) på fingertopp i samband med beslut om diabetesbehandling. Mätningar av blodsöcker med fingerstick krävs fortfarande för kalibrering i första hand en gång om dagen efter dag 21 och när symtomen inte stämmer överens med CGM-information eller när man tar mediciner i klassen tetracyklin. Proceduren för insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense E3 CGM-systemet är en receptbelagd anordning; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information.

Säkerhetsinformation finns på <https://www.global.eversensedabetes.com/safety-info>

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Ascensia och logotypen Ascensia Diabetes Care är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla andra varumärken ägs av respektive ägare och används enbart för informativa syften. Inget samband eller garanti ska antydast eller inbegripas.



Distribuerad av:
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Gustav III:s Boulevard 34, plan 4, 169 73 Solna
Eversense kundsupport
020 - 83 00 84 (kostnadsfritt)
www.diabetes.ascensia.se



Tillverkad av
Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA